

Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer

Dateiname	Erstelldatum	Autor	Freigabe durch	am	Version	Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer.docx	2018-11-21	Service & Support RIS/PACS	21.11.2018		2.1	1 von 5



Inhalt


1 Die wichtigsten Funktionen erklärt	3
1.1. IQ-View Startseite – gewünschte Bilder auswählen	3
1.2. IQ-Viewer Bildbetrachtung	4
1.3. Erläuterung Symbole	5
1.4. Funktionen in der Menüleiste	5

Dateiname Erstelldatum	Autor	Freigabe durch am	Version	Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer_2018-11-21	Service & Support RIS/PACS	21.11.2018	2.1	2 von 5

1 Die wichtigsten Funktionen erklärt

1.1. IQ-View Startseite – gewünschte Bilder auswählen

1. Studien oder Serien mittels einem Häkchen auswählen, entsprechender Inhalt wird danach geladen
2. Anschliessend starten Sie den Viewer

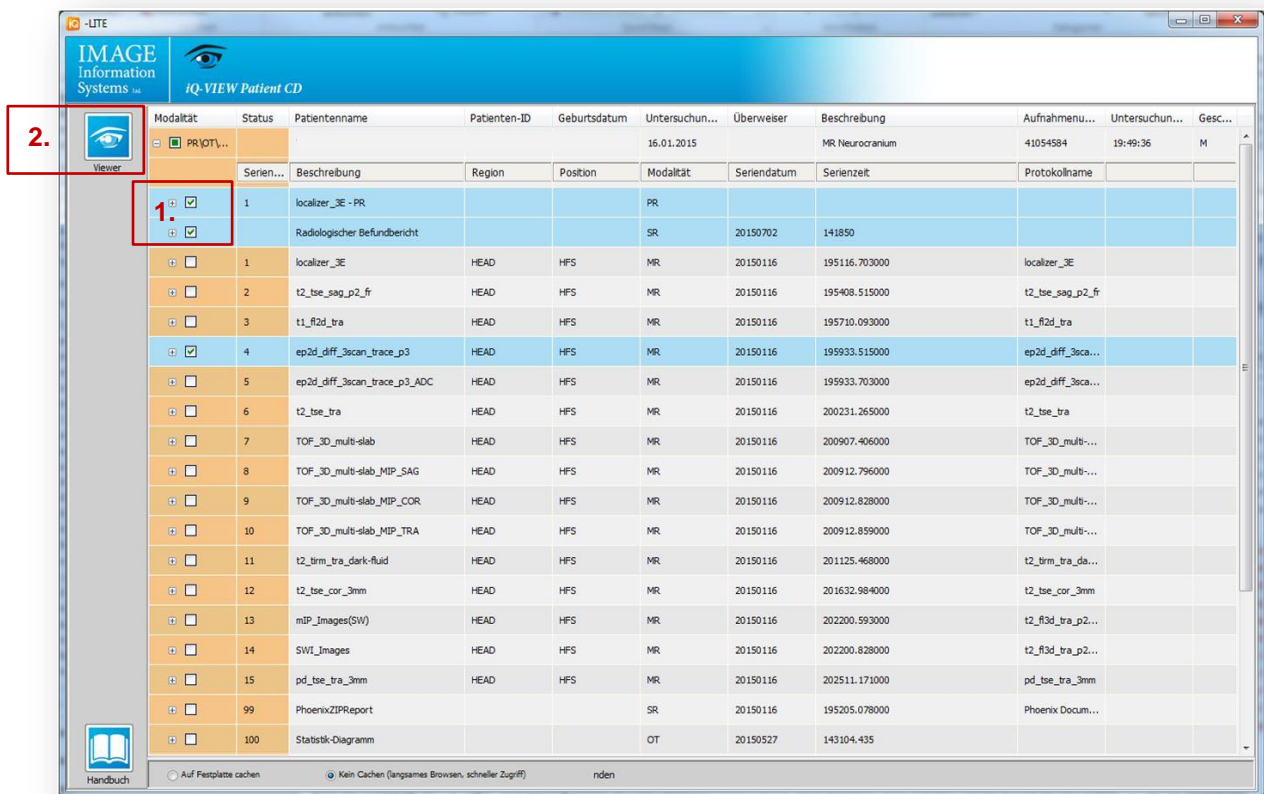

The screenshot shows the 'iQ-VIEW Patient CD' interface. At the top left, there is a 'Viewer' icon highlighted with a red box and the number '2.'. Below it is a table with columns: Modaltät, Status, Patientenname, Patienten-ID, Geburtsdatum, Untersuchun..., Überweiser, Beschreibung, Aufnahmemu..., Untersuchun..., Gesc... The table lists various studies and series. A second red box with the number '1.' highlights the checkboxes in the 'Serien...' column of the table.


Serien...	Beschreibung	Region	Position	Modaltät	Seriendatum	Serienzeit	Protokollname
<input checked="" type="checkbox"/>	1 localizer_3E - PR			PR			
<input checked="" type="checkbox"/>	Radiologischer Befundbericht			SR	20150702	141850	
<input type="checkbox"/>	1 localizer_3E	HEAD	HFS	MR	20150116	195116.703000	localizer_3E
<input type="checkbox"/>	2 t2_tse_sag_p2_fr	HEAD	HFS	MR	20150116	195408.515000	t2_tse_sag_p2_fr
<input type="checkbox"/>	3 t1_fl2d_tra	HEAD	HFS	MR	20150116	195710.093000	t1_fl2d_tra
<input checked="" type="checkbox"/>	4 ep2d_diff_3scan_trace_p3	HEAD	HFS	MR	20150116	195933.515000	ep2d_diff_3sca...
<input type="checkbox"/>	5 ep2d_diff_3scan_trace_p3_ADC	HEAD	HFS	MR	20150116	195933.703000	ep2d_diff_3sca...
<input type="checkbox"/>	6 t2_tse_tra	HEAD	HFS	MR	20150116	200231.265000	t2_tse_tra
<input type="checkbox"/>	7 TOF_3D_multi-slab	HEAD	HFS	MR	20150116	200907.406000	TOF_3D_multi-...
<input type="checkbox"/>	8 TOF_3D_multi-slab_MIP_SAG	HEAD	HFS	MR	20150116	200912.796000	TOF_3D_multi-...
<input type="checkbox"/>	9 TOF_3D_multi-slab_MIP_COR	HEAD	HFS	MR	20150116	200912.828000	TOF_3D_multi-...
<input type="checkbox"/>	10 TOF_3D_multi-slab_MIP_TRA	HEAD	HFS	MR	20150116	200912.859000	TOF_3D_multi-...
<input type="checkbox"/>	11 t2_brm_tra_dark-fluid	HEAD	HFS	MR	20150116	201125.468000	t2_brm_tra_da...
<input type="checkbox"/>	12 t2_tse_cor_3mm	HEAD	HFS	MR	20150116	201632.984000	t2_tse_cor_3mm
<input type="checkbox"/>	13 mIP_Images(SIV)	HEAD	HFS	MR	20150116	202200.593000	t2_fl3d_tra_p2...
<input type="checkbox"/>	14 SWI_Images	HEAD	HFS	MR	20150116	202200.828000	t2_fl3d_tra_p2...
<input type="checkbox"/>	15 pd_tse_tra_3mm	HEAD	HFS	MR	20150116	202511.171000	pd_tse_tra_3mm
<input type="checkbox"/>	99 PhoenixZIPReport			SR	20150116	195205.078000	Phoenix Docum...
<input type="checkbox"/>	100 Statistik-Diagramm			OT	20150527	143104.435	

Dateiname	Erstelldatum	Autor	Freigabe durch	am	Version	Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer_2018-11-21		Service & Support RIS/PACS	21.11.2018		2.1	3 von 5



1.2. IQ-Viewer Bildbetrachtung




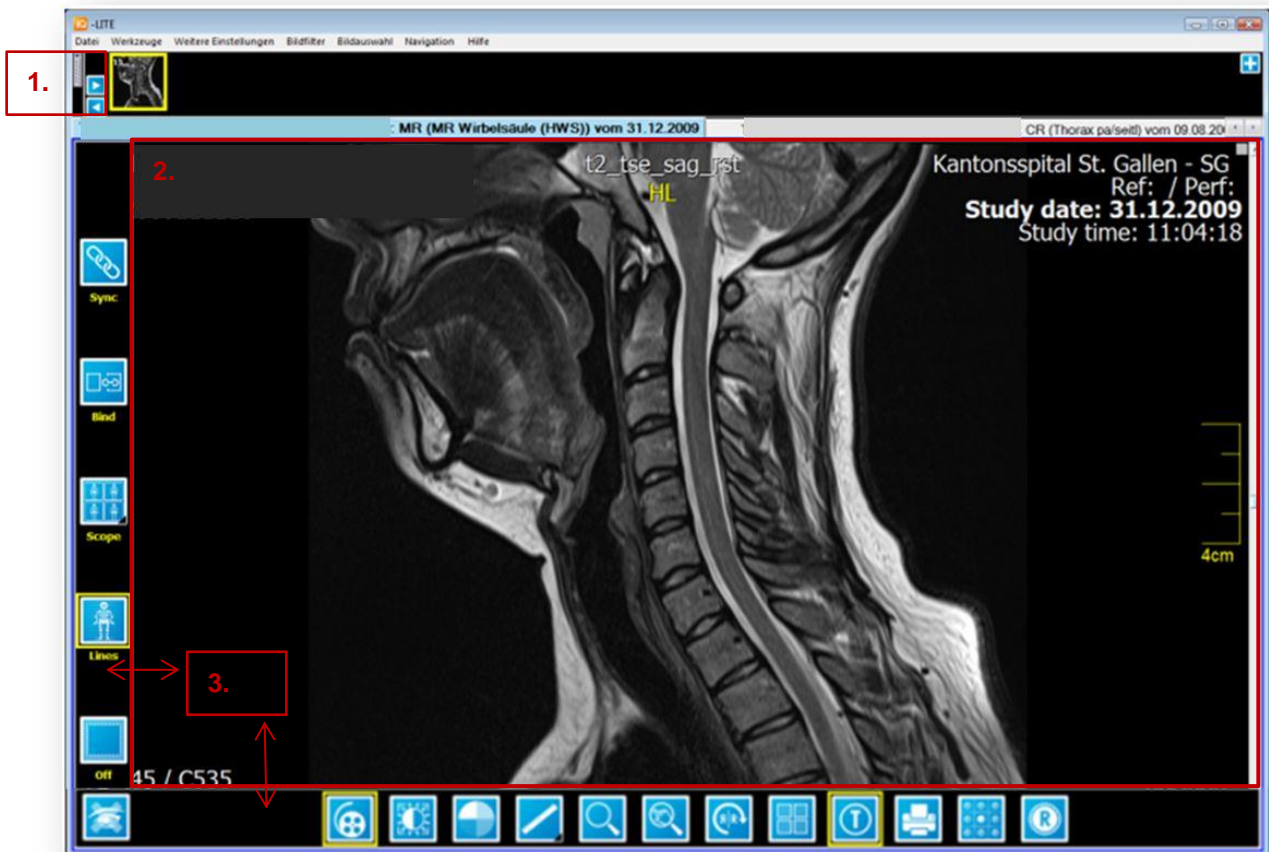







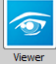





1. Navigations-Bereich: mit Pfeiltasten oder direkt auf die „Tabs“ klicken um andere Bilder/ Serien darzustellen
2. Bildbereich
3. Beim Überfahren mit dem Mauszeiger werden an der linken Seite oder unten Funktionsbuttons eingeblendet



Dateiname_Erstelldatum	Autor	Freigabe durch_am	Version	Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer_2018-11-21	Service & Support RIS/PACS	21.11.2018	2.1	4 von 5



1.3. Erläuterung Symbole


Untere Tool-Leiste	
 Viewer öffnen	 Cine Mode (automatisches Durchblättern)
 Viewer schliessen	 Bildschirmaufteilung
 Helligkeit und Kontrast ändern	 Bild spiegeln oder drehen
 Mess- und Winkel-Werkzeuge	 Patientendaten ein- und ausblenden
 Lupenfunktion	 Bilder ausdrucken
 Vergrössern (Optimal einpassen, 1x, 1.5x 2x, 3x)	 Bilder zurück auf Original-Zustand setzen
Linke Tool-Leiste	
 Synchronisieren mittels Tischposition	 Schichtposition anzeigen
 Alle Serien kontinuierlich durch scrollen	 Alle Funktionen der linken Tool-Leiste ausschalten
 Bild oder Serie bearbeiten	

1.4. Funktionen in der Menüleiste

- Weitere Funktionen können über die Menüleiste abgerufen werden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter dem Menüpunkt „Hilfe“.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Service Center: 071 494 66 66

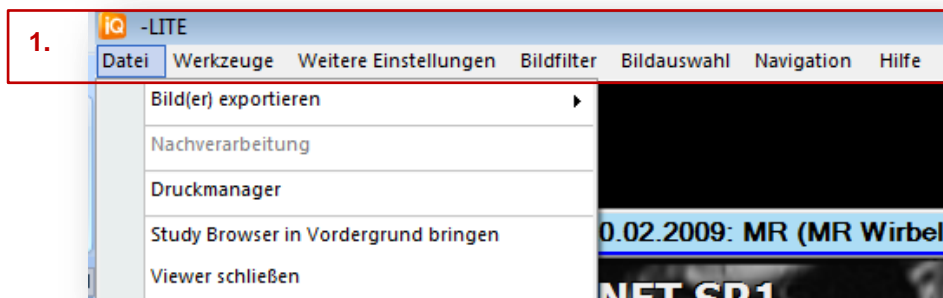

Dateiname_Erstelldatum	Autor	Freigabe durch_am	Version	Seite
Bedienungsanleitung IQ-Lite Viewer_2018-11-21	Service & Support RIS/PACS	21.11.2018	2.1	5 von 5